

最大のパフォーマンスを発揮するために

G A M E  R E A D Y®

アイシングマシン「GAME READY」使用方法・注意事項



日本国内正規代理店



 **MEDIARK**
株式会社メディアーク



<http://gamereadyjapan.com>

GAME READY 機能と製品名称

氷水を利用して、「冷却療法」と「圧迫療法」を同時におこなうことで、
皮膚表面を冷やしすぎず、広範囲に深部まで安定的にアイシングします

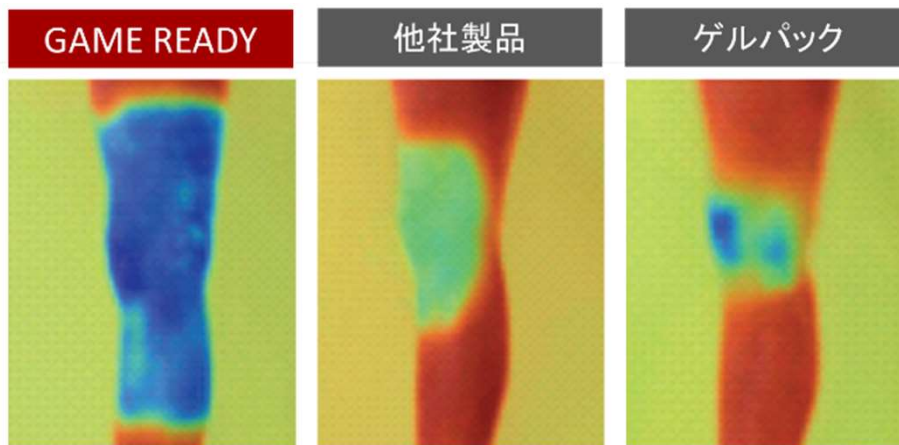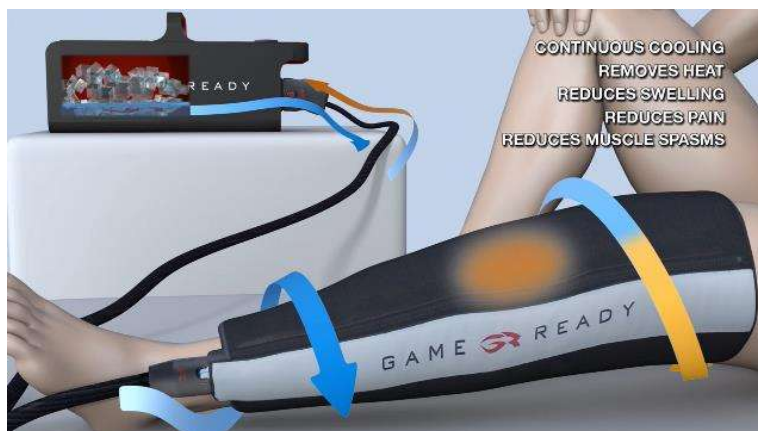

【GAME READY 製品名称】



本体（コントロールユニット）



コネクタホース



ACアダプタ

部位別の「ラップ」



GAME READY 基本使用手順

STEP.1



本体に水と氷を入れる

STEP.2



本体とACアダプタを接続

STEP.3



ラップを装着
(ラップを装着する際は、必ずホースから外した状態で装着)

STEP.4



本体とコネクタホースを接続してから、ホースとラップを接続

STEP.5



電源をON

STEP.6



モードや圧力の強さ、稼働時間、温度などを設定
※通常はマニュアルモードで使用

STEP.7



圧力の強さ、時間、温度は「マニュアルモード」で設定
※「プログラムモード」は温度のみ設定可能

STEP.8



プレイボタンでスタート
(スタート/一時停止)

- ✓ ラップを装着する際は、ラップを必ずホースから外して装着してください。ホースを外す際は、ホースの接続部のボタン「赤（本体側）・青（ラップ側）」を押しながら引き抜きます。
- ✓ 氷が少なくなった場合は、適宜、氷を追加をしてください。
- ✓ タンク内の氷水を捨てる場合は、本体を傾けてそのまま捨てていただいても構いません。

GAME READY 本体（コントロールユニット）操作

圧力切替:

圧力無 / 圧力弱 / 圧力中 / 圧力強
(2分目安で間欠的に圧迫していきます)

BEEP音: ON/OFF

バックライト: ON/OFF

電源ONライト

電源: ON/OFF

モード切替

押すごとに、プログラムモード6種類
とマニュアルモードに切り替わります
(基本はマニュアルモードで使用)

アイシング開始:
スタート/一時停止



温度切替

ターゲット温度
1°C~10°C
(ダイヤル式)

アイシング時間設定
5分~90分 (5分単位)
※マニュアルモードのみ利用可能

温度表示切替
摂氏 (C) / 華氏 (F)
※通常は、摂氏 (C) でお使いください

1. ラップとホースは、**利用する都度一度外して、ラップ内に溜まっている空気を完全に抜いてから、ラップを身体にぴったりと装着させ、装着後にラップとホースを接続の上、スタートさせてください。**
2. ラップを巻くときは、**マジックテープ部分がしわにならないようにまっすぐにぴったりと圧着させてください。**
3. ご利用後、**ラップに水分が付着したまま、ラップを畳んだり、密閉された状態になると、すぐにラップにカビが発生してしまいます。**ラップの利用後は、**なるべく広げたまま乾燥させるように保管してください。**持ち運びの際や折りたたんで保管する場合は、ラップを完全に乾燥させてからにしてください。（発生したカビを除去することは困難です）
4. 本体とホース、ホースとラップの脱着がスムーズにできなくなってきた場合は、付属しているシリコンスプレーを接続部に吹きかけて、乾拭きしてください。
5. ラップの装着不備や、**圧力に何らかの異常を感知した場合は、安全のため（身体や機器を守ります）エラー停止（コード表示）しますが故障ではありません。**一旦、本体の電源をOFFにして、ホースとラップを外して、ラップ内の空気を抜いてから、再度、しっかりと装着の上、利用を再開してください。
（エラーコード「04」の表示は、本体内の水不足です。水を追加してください。）

クイックスタートガイド (使い方サマリー)

GAME  READY®



STEP.1



本体に水と氷を入れる

STEP.2



本体とACアダプタを接続

STEP.3



ラップを装着
(ラップを装着する際は、必ずホースから外した状態で装着)

STEP.4



本体とコネクタホースを接続して
から、ホースとラップを接続

STEP.5



電源をON

STEP.6



モードや圧力の強さ、稼働時間、
温度などを設定
※通常はマニュアルモードで使用

STEP.7




圧力の強さ、時間、温度は
「マニュアルモード」で設定
※「プログラムモード」は
温度のみ設定可能

STEP.8



プレイボタンでスタート
(スタート/一時停止)

ポイント！ STEP.1

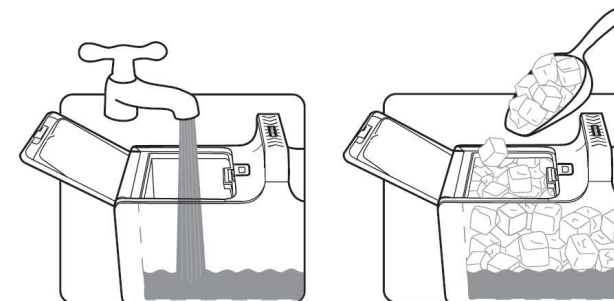

容器内のラベルの満量表示線まで水を満たします。入れすぎないようにします。
アイスボックスの一番上まで氷を加えます。

ポイント！ STEP.7

マニュアル (Manual) モード:

		+/- ボタンを押して、5分ごとの増分で時間を設定します。
		圧力ボタンを押すことによって圧力を設定します。4種類の圧力設定から選択できます: オフ (Off)、低 (Low) 圧力 (5~15 mmHg)、中 (Med) 圧力 (5~50 mmHg)、高 (High) 圧力 (5~75 mmHg)。

プログラム (Program) モード:

	Program (プログラム) モードに入るにはプログラムボタンを押します。プログラム (Program) モードでは、ユニットは選択されたプログラムに従って連続的に作動します。先にステップ2で示された通り、氷と水の補給が必要になります。
	以下のプログラムから選択できます: (プログラムボタンを押して、利用可能なプログラムをスクロールします。) プログラム1: 30分間オン、30分間スリープ。圧力無し。 プログラム2: 30分間オン、30分間スリープ。低圧力。 プログラム3: 30分間オン、30分間スリープ。中圧力。 プログラム4: 30分間オン、60分間スリープ。圧力無し。 プログラム5: 30分間オン、60分間スリープ。低圧力。 プログラム6: 30分間オン、60分間スリープ。中圧力。 プログラムd: ドレインモード。詳細については本説明書の5ページを参照してください。

【画面アイコン】

画面		
ステータスバー: Vol 	Vol 	オフ (ミュート) オン
Manual 	Manual 	選択したモードを示す。
Program 	Program 	
Pause 	Pause 	ユニットが一時停止していることを示す。
Play 	Play 	ユニットが作動していることを示す。
他のアイコン:	エラー 	エラーがあることを示す。エラーコードについてはページ24~26の「トラブルシューティング」を参照してください。
	スリープ 	スリープ (Sleep) モードの時間を示す。
	バッテリー 	バッテリーの残容量を示す。
温度:		実際温度 (Actual Temperature): コントロールユニットから出る水のおおよその温度。 目標温度 (Target Temperature): 目標温度設定を示す。コントロールユニットは実際温度と目標温度を可能な限り近く自動的に合わせる。

画面	
システムがプログラム (Program) モードで作動時:	スリープ時間カウントダウンバー。残存作動時間を表示。 作動時間カウントダウンバー。残存スリープ時間を表示。
システムがマニュアル (Manual) モードで作動時:	残存作動時間を表示。
プログラムの選択時:	プログラムの選択時: 
	圧力 (Pressure) を表示。 Volume  Manual  Program  Pause  Play  スリープ時間 (Sleep Time) を表示。 ユニットの作動時間 (Run Time) を表示。

画面	
圧力 (Pressure):	 OFF Low Med High OFF Low Med High OFF Low Med High OFF Low Med High

メディアークGAME READY 日本公式サイトに、注意事項などガイダンスを掲載予定
<https://www.gamereadyjapan.com/>

「ゲームレディ」で検索！